

HEMCON

.....

Los apósitos Hemcon controlan las hemorragias y salvan vidas



La tecnología Hemcon

- Cuando el Chitosan de Hemcon contacta con la sangre, este se hace extremadamente viscoso, adhiriéndose a la herida y sellándola.
- Hecho con Chitosan, un polisacárido natural, biocompatible, derivado del caparazón de las gambas.
- Los apósitos Hemcon están disponibles en diversos tamaños y formas con el fin de tratar gran variedad de heridas.
- El apósito Chitoflex es la última aplicación de Hemcon con su tecnología basada en Chitosan. Este vendaje flexible está diseñado para heridas penetrantes o de metralla que no pueden ser tratadas de otro modo.
- Los apósitos son capaces de controlar incluso sangre arterial a alta presión y altos flujos. El Chitosan tiene carga positiva y atrae las células sanguíneas cargadas negativamente. Las células rojas de la sangre crean un sello en torno a la herida cuando se confrontan con la venda, formando un coágulo adherente y hermético.
- El apósito es fácil de quitar con agua o solución salina (suero fisiológico).

Eficacia e inocuidad

- No se conocen efectos adversos en sus cuatro años de uso.
- No produce calor.
- No contiene factores coagulantes ni humanos ni animales.
- Usado con éxito en pacientes que toman medicación anticoagulante sin alterar el régimen de medicación subyacente .

Información adicional para todos los productos Hemcon

- No intente reposicionar el vendaje una vez aplicado. Una vez usado, el vendaje ya no volverá a ser efectivo.
- Si el vendaje no controla la hemorragia de forma aceptable, quítelo, limpie el área con una gasa para quitar el exceso de Chitosan y use otro vendaje.
- Si el vendaje se pega a la herida , pero no consigue parar totalmente la hemorragia, no lo quite enseguida. Dependiendo de la severidad de la hemorragia que aun se mantenga , podría ser mejor mantener el vendaje puesto. Es una decisión que usted deberá tomar basándose en la herida en particular , en su entrenamiento y en su experiencia.
- Aplicar un vendaje que presione sobre el producto Hemcon para asegurarlo y prevenir la contaminación. Chequear la herida con frecuencia para prevenir potenciales nuevas hemorragias.
- Tanto el apósito Hemcon como el Chitoflex han sido diseñados para controlar temporalmente la hemorragia severa. Estos vendajes no son adecuados para el cuidado de heridas durante largo tiempo.
- Estos vendajes deben ser aplicados inmediatamente después de abierto el envase. Su efectividad y esterilidad se pueden ver comprometidas si se excede este tiempo.
- Si la herida ha de sumergirse, se debe de cubrir con una cubierta impermeable. Los productos Hemcon no pegan si se empapan en agua.

Cómo usar los apósitos Hemcon

Apósitos Hemcon

Los apósitos Hemcon son fáciles de usar, pero algunos pasos claves han de ser seguidos para que estos apósitos sean más efectivos.

1. Sacar la venda

Agarre los bordes opuestos del envoltorio de aluminio y tire de ellos. Cuando esté abierto, pincee el apósito con la parte de atrás del envoltorio con el pulgar de forma que la venda no se caiga al suelo.

2. Asegúrese que el lado que no se adhiere queda hacia arriba.

Los apósitos Hemcon tienen dos lados: el lado activo de color crema, que va a la herida, y uno más oscuro que no se adhiere que viene etiquetado como "THIS SIDE UP" (Este lado hacia arriba). El apósito no funcionará con el lado oscuro hacia abajo.

3. Aplicar directamente en la zona de sangrado.

Es crítico situar la venda en la fuente de sangrado, el área donde el daño a los vasos sanguíneos se sitúa actualmente. Para heridas más pequeñas, el apósito puede ser cortado en piezas más pequeñas. Para heridas más grandes, podemos usar múltiples vendas.

4. Aplicar presión al menos durante dos minutos.

Apoyar firmemente e incluso presionar sobre el lado etiquetado como "THIS SIDE UP". Apoyar el apósito con una gasa para asegurar una presión uniforme y mejorar el funcionamiento. Mantenga la presión sobre el apósito durante al menos dos minutos hasta que la hemorragia sea controlada.



Aplicar directamente en de sangrado



Aplicar presión al menos dos minutos



Cuidar la herida

Cómo usar los Chitoflex Hemcon

Chitoflex

1. Abrir el Chitoflex.

Chitoflex se suministra en un envoltorio hermético de aluminio con una lengüeta que facilita su apertura. Agarrar los bordes opuestos y tirar de ellos. Cuando el envoltorio empiece a abrirse, tenga cuidado para que el apósito no se caiga al suelo.

2. Empújelo dentro de la trayectoria de la herida.

El chitoflex es activo por las dos caras. El apósito se hará viscoso cuando contacte con la sangre. Agarrar rápidamente el apósito y empujarlo agresivamente dentro de la trayectoria de la herida para una mayor efectividad. Resulta crítico situar el Chitoflex en la fuente de sangrado, el área donde el daño a los vasos sanguíneos se sitúa actualmente.

3. Respaldo con una gasa Mantener la presión.

Una vez situado el Chitoflex, apoyar sobre el apósito con una gasa y presionar sobre la herida. Mantener la presión sobre el vendaje durante al menos dos minutos o hasta que se adhiera y se controle la hemorragia. No intente reposicionar el Chitoflex una vez aplicado. Una vez usado no funcionará más.

A parte de ser introducido a toda prisa dentro de la herida, el Chitoflex puede ser cortado o modelado para tratar múltiples tipos de heridas. Para heridas de diámetros inferiores, Chitoflex puede ser plegado en forma de "C" antes de ser insertado dentro de la trayectoria de la herida.



Empújelo dentro de la herida rápidamente



Rellene la herida con el vendaje



Aplique presión con una gasa



Asegure el vendaje

CÓDIGO	ARTÍCULO	PACK
H-101	Apósito individual (10x10cm.)	5
H-104	Apósito individual (5x5cm.)	5
H-105	Apósito individual (5x10cm.)	5
H-109	Chitoflex (7x23cm.)	1
H-110	Chitoflex (7,5 x 71 cm.)	1
H-112	Chitoflex (2.5x7cm.)	10
H-126	Hemcon strip	50
H-129	Parche Hemcon (3.81x3.81cm.)	10