


Mejore a la atención a su paciente, optimice la eficiencia de su personal y el tiempo de estancia del paciente.

Hemostático Strip de hemcon para diálisis

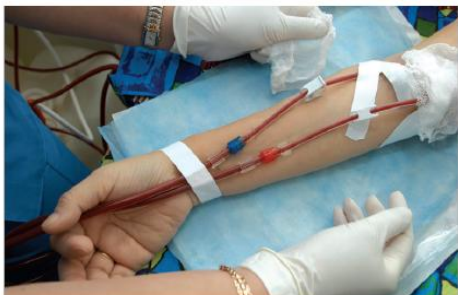

Control efectivo de la hemorragia para procedimientos de acceso

- Para Fístula Arteriovenosa y sangrado de injertos en la extracción de vainas.
- Para Fístula Arteriovenosa y sangrado de injertos posterior a procedimiento de descoagulación.
- Sangrado de catéter.
- Sangrado desde un lugar de pinchazo para acceso post hemodiálisis.



Lo que dicen los expertos...

Usamos el Hemcon Strip en procedimientos de coagulación que requieren suturas cuando el paciente puede aun estar sangrando debido a la Heparina o TPA usados. Funciona muy bien y no hemos tenido ninguna queja de nuestros centros de diálisis relacionado con quitar el apósito con agua en el siguiente tratamiento.

Amy Howser, RT –RMS Lifeline, El Paso, TX

Ventajas de los Strips Hemcon

- Se acorta el tiempo de compresión manual.
- Ayuda a preservar fístulas e injertos
- Proporciona más tiempo libre al personal sanitario.
- Evita suturar a ciertos pacientes
- Efectivo en pacientes que reciben anticoagulantes.
- Proporciona una barrera antibacteriana que protege el lugar de acceso y puede ayudar a reducir el riesgo de infección.
- No retrasa el tiempo de preparación de la diálisis.

Instrucciones de uso



1. Extraiga la vaina según el protocolo fijado por su centro/Hospital.
2. Permita que una pequeña cantidad de sangre, aproximadamente del tamaño de una moneda de 1 céntimo, rodee el sitio de punción.

Se necesita sangre para que el apósito selle la herida

3. Sin quitar la funda de los lados del adhesivo, doble los lados hacia arriba y sitúe el centro blanco del apósito en contacto con la fuente del sangrado.
4. Mantenga la presión de 3 a 5 minutos o hasta que el sangrado sea controlado.



5. Una vez el sangrado controlado, quite la funda de las lados del adhesivo y asegure el Hemcon Strip en el brazo del paciente.
6. El Hemcon Strip puede dejarse en el sitio durante más de 48 horas. Mantenga el apósito seco.

Instrucciones para quitarlo: El paciente puede quitarse el Hemcon Strip empapándolo de agua durante la preparación para la siguiente sesión de diálisis.